

I'm not a bot



table so the cuff is at the same level as your heart. 3. Place both feet on the ground. Important: The arm cuff must be at the same level as your heart or accurate measurement will not be possible. (Your heart is located slightly below your left armpit.)6 PARTS IDENTIFICATION Monitor Accessories AC Adaptor portDESCRIPTION OF DISPLAY MARKS Inflating Battery Display *The battery indicator will reset when power resets. Please replace with new batteries when the battery Deleting indicator flashes. Measurement Error Arrhythmia Detection Function Measuring 7 PREPARATION BEFORE TAKING A MEASUREMENT Battery Installation/Replacement 1. Slide the battery cover off in the direction of the arrow. 2. Install or replace the four alkaline AA batteries, noting the proper orientation of positive (+) and negative (-) terminals in the battery compartment. 3. Replace the battery cover. 4. If the Low Battery Symbol appears on the display, replace the batteries. 5. Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time. How to Apply the Arm Cuff 1. Insert the end of the cuff through the D-Ring to make a loop. (Make sure that the hook and loop closures stays outside when it is done.) Step 1 Step 2 2. Wear the arm cuff with the hose downward and line up your brachial artery with the Artery Mark. Pull the end of the cuff until brachial artery it is wrapped snugly around arm and secure it with the velcro. 3. Adjust the cuff so that the bottom edge is about 1 inch above the elbow on the inside of the arm. Make sure the colored area on the cuff covers the brachial artery. 4. Plug the air tube connector into the monitor. Note: Batteries are hazardous waste. Step 3 Step 4 Do not dispose with household garbage.8 TAKING A MEASUREMENTPlease read the previous section on proper placement of the cuff and arm position.1. After the cuff has been properly placed on the arm, please press SET button and select [] or [] on the upper left hand corner of the LCD screen, and then press the Start I Stop button.2. After the display reads 00 the cuff will automatically inflate to an appropriate pressure. Then press the Start/Stop button twice. After inflation, it will slowly deflate to take the measurement. When the heart mark appears a measurement is in process. The cuff will be quite snug for a short while, this is normal. Try to relax, refrain from talking and remain as still as possible during the measurement. Note: If the device determined that the initial inflation pressure was insufficient, it will re-inflate to a higher pressure.3. The device will completely deflate when the measurement is finished. The systolic and diastolic pressure and pulse rate will be displayed.To end a measurement for any reason, just press the Start/Stop button to turn off the unit and release the cuff pressure. If during a measurement the power drops to an insufficient level, the device will end themeasurement and display the low battery symbol. Please replace the batteries and repeat the measurement.If the device cannot detect your pulse, it will end the measurement attempt. Please wait a few minutes, make sure that the cuff is positioned properly and try again. The device will automatically shut off 1 minuteafter a measurement is finished. You can also press Start | Stop button to shut the device off. 9 SETTING DATE AND TIME The device displays time and date on the LCD. They can be set according to the following method: 1. Make sure the machine is powered OFF, then hold the SET button for 5 seconds until digits on the screen start flashing. 2. Press the SET button to switch between month, date, hour and minute. 3. Press the MEM (Memory) button to advance the display selected by one digit at a time. 4. When the unit is powered off, the clock will continue to display on the LCD screen. SETTING TALKING FEATURE For the MDS5001, after the date and time settings are selected, the "SP" character will flash. Press the MEM (Memory) button to move from English, "SP 01", to Spanish, "SP 02", or to fo, "SP 0F". MEMORY FUNCTION Memory Input When a valid measurement is made, the result (systolic, diastolic, pulse rate, date and time) will be stored in the memory automatically as soon as the device is turned off or when another measurement is initiated. The device can store up to 90 readings for each of 2 users, and also compute the average of the latest 3 readings. When more than 90 readings are stored, the oldest ones will be replaced. Memory Recall By pressing Memory button, AVG will be shown in the lower left hand corner. AVG means the average of all recorded readings. Press the Memory button again and 01 will appear in the lower right hand corner, which is your latest reading in the memory. When you press Memory again, 02 will display which is the previous reading. When you press the Memory button repeatedly, the records will be displayed sequentially, along with the corresponding date of the measurement.10 Memory ErasePress memory button and hold it down more than 3 seconds.You will erase all of the records of readings for the selected user.SETTING ALARM CLOCK1. Make sure the machine is powered OFF, then hold the SET button for 5 seconds until digits on the screen start flashing.2. Press the SET button to advance the screen from the date, time, and talking feature.3. The screen will have a small bell located in the upper left hand corner of the screen.4. Press the MEM (memory) button to change the alarm clock from OFF to ON.5. Once ON, press the SET button to switch to the time located above "ON" on the lcd screen.6. Press the MEM (memory) button to change the hour digit.7. Once the hour is set, press the SET button to move to the minute digits.8. Press the MEM (memory) button to change the digits.9. Once the alarm is set and turned on, a small bell icon will appear in the top left hand corner of the screen when the unit is powered off. 11 ER INDICATORS Error Indicators Possible Sources of Errors Indication: Incomplete inflation Correction: Check that the cuff has been firmly connected with the device. If the same ER message is displayed, contact Product Support. Indication: Cuff over-inflated and released automatically Correction: Take a break for 5-10 minutes. Then reposition the cuff and measure again. Indication: Could not obtain the pulse rate Correction: Wait 5-10 minutes. Then reposition the cuff and measure again. Indication: Strong electromagnetic interference (mobile phone or computer) Correction: Relax and take a break for 5-10 minutes. Then measure again. Indication: Irregular pulse rate or blood pressure Correction: Relax and take a break for 5-10 minutes. Then measure again.12 TROUBLESHOOTINGProblem Recommended MethodNo display Make sure that the batteries are installed in the proper direction. (Polarity matches the indication in the battery case.)No measurement Check that the cuff is positioned properly, then repeat theoccur measurement procedure.Blood pressure 1. Check if your arm is positioned properly.readings are too 2. Position your arm on a table so the cuff is at the same level as your heart,high or too low 3. Remain seated during the entire measurement period. 4. Refrain from hand and body movements during measurement.Blood pressure Your blood pressure can fluctuate considerably throughout the day, all of thereadings are following factors can influence your blood pressure: emotional state, dailyvariable activities/exercise, smoking, drinking alcoholic beverages, eating, taking certain medications 13 SENSOR CALIBRATION MODE The blood pressure should be recalibrated. The unit arrives pre-calibrated by the vendor. Should any issues arise with the device, please contact Product Support. mmHg and kPa Transferring Instruction If you want to change the measurement units, power off the device and then press the Start/Stop button for 10 seconds. Next press the "Memory" button and select mmHg or Kpa. CARE AND MAINTENANCE - Keep the device away from high temperatures, high humidity and direct sunlight. - Keep sharp objects away from the cuff and tubing. - Do not press the Start/Stop button without the cuff around your arm to avoid excess pressure build up that may damage the cuff. - Use the device at a sufficient distance from strong electrical fields, such as television, microwave ovens, X-ray equipment, etc. - Do not subject the device to strong impact or drop it on the floor. - Do not disassemble or modify the device or the cuff. - Remove the batteries when the device is to be stored for extended periods of time. Note: Removing the batteries will erase all readings in memory. Use only a soft dry cloth to clean the unit. Do not use solvents or other petroleum-based cleaners.14 SPECIFICATIONSManufacturer Model: BA-813Medline Item Numbers: MDS5001Measuring Method: OscillometricMemory Function: Storage and recall for 90 measurements per user (up to 2 users)Display: Backlight LCD DisplayMeasuring Range: Pressure: 0-280 mmHg Pulse: 40-199/minuteSensor Accuracy: Pressure: 3mmHg Pulse: 5%Inflation System: Electro-pneumatic pumpArm Size Ranges: 22-42 cm (8.6-16.5 inches)Batteries: 1.5V alkaline (LR6/AA)X4Automatic Power-off: Approx. 1 minute after measurementReference Method for Clinical Trials: Auscultatory measurementWeight: Approximately 465g(without batteries)Operating Condition: 41F ~ 104F (5C ~ 40C) 10%~90%RHStorage and Transport Condition: -4F ~ 149F (-20C ~ 65C) 10%~95%RHStandard Cited: EN 1060-1 EN 60601-1-2 EN 1060-3 EN 14971 EN 60601-1 15 www.medline.com 2021 Medline Industries, LPManufactured for Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.Product of Taiwan, Finished in China. 1-800-MEDLINE V4 R21DGA MONITOR DEPRESIN ARTERIALAUTOMTICOMANUAL DEL USUARIO MDS5001 NDICENotas importantes21Exactitud de la medicin21Informacin til22Mtodo de medicin correcto 24Identificacin de las piezas 25Descripcin de las indicaciones en pantalla 25Preparacin antes de tomar una medicin 26Cmo tomar una medicin 27Configuracin de fecha y hora | Ajuste de la funcin de conversacin 28Funcin de memoria 28Ajuste del reloj de alarma 29Indicadores de error/solucin de problemas 30, 31Modo de calibracin del sensor 32Cuidado y mantenimiento 32Especificaciones 33Registro de presin arterial 34 NOTAS IMPORTANTES1. Solo el mdico est calificado para interpretar los cambios en su presin arterial. Este dispositivo no tiene como objetivo reemplazar los exmenes mdicos perdidos. Se recomienda que su mdico revise el procedimiento que emplea para utilizar este monitor. Nunca realice ajustes en sus medicamentos a menos que se lo recomiende el mdico.2. Este monitor de presin arterial est diseado para su uso en adultos. Los nios no deben utilizar este monitor a menos que estn supervisados por un adulto.3. Utilice solo los manguitos incluidos con este dispositivo o que se ofrecen como accesorios aprobados. Los manguitos no aprobados pueden afectar la exactitud de la medicin.4. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de utilizar este monitor de presin arterial.5. Smbolo de advertencia 8. Mantener seco6. Smbolo de Tipo BF 9. El producto debe reciclarse separado7. Smbolo de Clase II de otros residuos domsticos.EXACTITUD DE LA MEDICINLa calidad de este dispositivo se ha verificado y cumple con las disposiciones de la Directiva del Consejode la UE 93/42/CEE, relativa a los dispositivos mdicos, as como la Directiva de CEM 89/336/CEE.EN 1061-1 Requisitos generales de equipos no invasivos de medicin de la presin arterialEN 1060-3 Requisitos complementarios de equipos no invasivos de medicin de la presin arterial para sistemas electromecnicos de medicin de la presin arterialEN 60601-1 Requisitos de seguridad para equipos elctricos mdicosEN 60601-1-2 Requisitos de compatibilidad y seguridad electromagnticas para equipos elctricos mdicosEN 14971 Anlisis de riesgos para dispositivos mdicos 21 INFORMACIN TIL Qu es la presin arterial? La presin arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Esta fuerza cambia constantemente mientras late el corazn. Cuando el corazn se contrae, la presin arterial alcanza su valor ms alto. Esto se denomina presin arterial sistlica. Cuando el corazn se relaja entre los latidos, el valor de la presin arterial es menor. Esto se denomina presin arterial diastlica. La unidad de medicin de la presin arterial es el milmetro de mercurio, que se abrevia mmHg. Por ejemplo, la presin arterial de una persona se puede medir como 120 mmHg (sistlica) y 80 mmHg (diastlica). Se expresa 120 sobre 80 y se escribe 120/80. Recuerde que la presin arterial vara durante todo el da. La ingesta de alimentos, el tabaquismo, la hora del da, el estrs, el nivel de ejercicio y muchos otros factores pueden afectarla. Fluctuaciones tpicas de la presin arterial diaria (Por ejemplo: hombre de 35 aos de edad) Presin arterial (mmHg) sistlica diastlica Hora Almuerzo Conduccin a casa Relacin sexual Conduccin al trabajo Horas en la oficina Horas con la familia Sueo Horas de consulta mdica Qu es la presin arterial alta? La hipertensin, o presin arterial alta, es una afeccin en la que la presin arterial de una persona per- manece alta durante un largo periodo de tiempo. Consulte con su mdico si tiene dudas o inquietudes con respecto a la hipertensin.22 Clasificacin de la presin arterialLa Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de Hipertensin (ISH, por sus siglasen ingls) Sistlica (mmHg) Hipertensin-grado 3 Hipertensin-grado 2 Hipertensin-grado 1 Alta-normal Norma tpica Diastlica (mmHg)Por qu es importante medirse la presin arterial en el hogar?Cuando se toma la presin arterial en el consultorio del mdico puede ponerse nervioso, por lo tanto lalectura podra aumentar artificialmente. Tener la capacidad de tomarse la presin arterial en el hogar lefacilita llevar un registro de las lecturas diarias. Esto lo ayudar a comprender mejor la lectura de la presinarterial y los factores que la afectan. Asegrese de compartir su informacin con su mdico.Consejos para una medicin exacta1. Reljese e intente permanecer inmvil durante 5 a 10 minutos antes de una medicin.2. Quite la ropa de la parte superior del brazo de manera que el manguito sepueda colocar directamente sobre la piel. La Constrictinconstriccin de la parte superior del brazo causada al enrollar excesiva la manga de la camisa puede causar una lectura inexacta. Para evitarlo, qutese totalmente la prenda.3. Abstngase de comer, fumar y beber (especialmente bebidas alcohlicas) antes de una medicin. Estas actividades pueden afectar la presin arterial. 23 4. Recuerde que la presin arterial vara continuamente durante todo el da. Intente tomarse la presin arterial a la misma hora cada da. 5. No se preocupe por los resultados de una medicin. Muchas mediciones, registradas durante un periodo de tiempo prolongado, proporcionarn una mejor indicacin de la presin arterial. 6. Reljese durante 5 a 10 minutos antes de volver a medirse la presin arterial. 7. Debido a que muchos factores pueden afectar la presin arterial, son comunes las fluctuaciones diarias de 25 a 50 mmHg. Tenga en cuenta que: Algunas personas con hipertensin, diabetes, trastornos renales, arteriosclerosis o mala circulacin pueden ver una diferencia significativa en las lecturas de la presin arterial tomadas en la mueca, en comparacin con las lecturas en la parte superior del brazo. Se le recomienda consultar con su mdico con respecto al uso de este monitor. MTODO DE MEDICIN CORRECTO Para obtener la medicin de la presin arterial ms exacta, siga estas instrucciones importantes: 1. Sintese en una silla con respaldo. 2. Apoye el brazo sobre una mesa para que el manguito quede al mismo nivel que su corazn. 3. Coloque ambos pies en el suelo. Importante: El manguito debe estar al mismo nivel que el corazn o no ser posible la medicin exacta. (Su corazn se encuentra ligeramente debajo de la axila izquierda).24 IDENTIFICACIN DE LAS PIEZASMonitor Accesorios Pantalla L CD Manguito Conector del tubo de aire Puerto adaptador A / C Manguera del manguito Botn Memory (Memori a) Botn Start/S top (Inicio/Detene r) Botn Set (Configurar)Toma del tubo de aireDESCRIPCIN DE LAS INDICACIONES EN PANTALLA Inflando Indicador de la batera *El indicador de la batera se restablece cuando se restablezca la energa. Sustituya con pilas nuevas Desinflando cuando el indicador de la batera parpadee. Error de medicin Funcin de deteccin de arritmia Midiendo 25 PREPARACIN ANTES DE TOMAR UNA MEDICIN Instalacin/sustitucin de las pilas 1. Deslice la tapa de las pilas en la direccin de la flecha. 2. Instale o sustituya las cuatro pilas alcalinas AA, observando la orientacin adecuada de las terminales positiva (+) y negativa (-) en el compartimiento de las pilas. 3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas. 4. Si aparece el smbolo de batera baja en la pantalla, sustituya las pilas. 5. Retire las pilas si el dispositivo no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado. Cmo colocar el manguito 1. Inserte el extremo del manguito a travs del anillo en forma de D para hacer un lazo. (Asegrese de que los cierres de velcro queden hacia afuera). Paso 1 Paso 2 2. Wear the arm cuff with the hose downward and line up your brachial artery with the Artery Mark. Pull the end of the cuff until it is wrapped snugly around arm and secure it with the velcro. artery brachial 3. Modifique la ubicacin del manguito de modo que el borde Palma inferior se encuentre aproximadamente 2,5 cm (1 pulgada) por hacia arriba encima del codo en la parte interna del brazo. Asegrese de que el rea coloreada del manguito cubra la arteria braquial. 4. Conecte el conector del tubo de aire en el monitor. 2,5 cm (1 pulg.) Nota: Las pilas son residuos peligrosos. No las deseché con los residuos domsticos. Paso 3 Paso 426 CMO TOMAR UNA MEDICINLea la seccin anterior sobre la colocacin adecuada del manguito y la posicin del brazo.1. Despus de colocar correctamente el manguito en el brazo, pulse el botn Set (Configurar) y seleccione [] o [] en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD y pulse el botn Start I Stop (Inicio I Detener).2. Despus de que la pantalla muestre 00, el manguito se inflar automticamente a una presin adecuada. Luego pulse dos veces el botn Start/Stop (Iniciar/Parar). Despus de inflado, se desinflar lentamente para tomar la medicin. Cuando aparece la marca de corazn , est en proceso una medicin. El manguito estar bastante ajustado durante un momento breve, esto es normal. Intente relajarse, abstngase de hablar y permanezca lo ms inmvil posible durante la medicin. Nota: Si el dispositivo determina que la presin de inflado inicial era insuficiente, se volver a inflar a una presin ms alta.3. El dispositivo se desinflar por completo cuando se termina la medicin. Se mostrar la presin sistlica y diastlica y la frecuencia de pulso. Fecha/Hora Pr esin sistlica Pr esin diastlica Frecuencia de pulsoPara finalizar una medicin por cualquier motivo, basta con pulsar el botn Start/Stop para apagar la unidad y liberar la presin del manguito. Si durante una medicin la energa disminuye a un nivel insuficiente, el dispositivo finalizar la medicin y mostrar el smbolo de batera baja. Sustituya las pilas y repita la medicin.Si el dispositivo no puede detectar el pulso, finaliza el intento de medicin. Aguarde unos minutos, asegrese de que el manguito est colocado correctamente y vuelva a intentarlo. El dispositivo se apagara automticamente 1 minuto despus de terminada la medicin. Tambin puede pulsar el botn Start | Stop para apagar el dispositivo. 27 CONFIGURACIN DE FECHA Y HORA El dispositivo muestra la hora y fecha en la pantalla LCD. Se pueden configurar de acuerdo con el siguiente modo: 1. Asegrese de que el equipo est apagado, a continuacin, mantenga presionado el botn SET (Configurar) durante 5 segundos hasta que los dgitos de la pantalla comienzan a parpadear. 2. Pulse el botn SET para alternar entre mes, da, hora y minuto. 3. Presione el botn MEM (Memoria) para avanzar la pantalla seleccionada de un dgito por vez. 4. Presione el botn MEM (Memoria) para avanzar la pantalla seleccionada de un dgito por vez. AJUSTE DE LA FUNCIN DE CONVERSACIN Para el modelo MDS5001, despus de seleccionarse los ajustes de fecha y hora, destellar el carcter "SP". Pulse el botn MEM (Memoria) para pasar del ingls, "SP 01", al espaol, "SP 02", o desactivar, "SP 0F". FUNCIN DE MEMORIA Entrada de memoria Cuando se realiza una medicin vlida, el resultado (presin sistlica, presin diastlica, frecuencia de pulso, fecha y hora) se almacena en la memoria automticamente cuando se apague el dispositivo o cuando se inicie otra medicin. El dispositivo puede almacenar hasta 90 lecturas para cada uno de los 2 usuarios y calcular el promedio de las ltimas 3 lecturas. Cuando se almacenen ms de 90 lecturas, se sustituirn las ms antiguas. Recuperacin de la memoria Al pulsar el botn Memory, se mostrar AVG en la esquina inferior izquierda. AVG significa el promedio de todas las lecturas registradas. Presione el botn Memory de nuevo y aparecer 01 en la esquina 28 inferior derecha, que es su ltima lectura en la memoria. Al pulsar Memory de nuevo, aparecer 02, que es la lectura anterior. Al pulsar repetidamente el botn de memoria, los registros se mostrarn en formasecuencial, junto con la fecha correspondiente de la medicin.Borrar memoria FECHA HORAPress memory button and hold it down more than 3 seconds.You will erase all of the records of readings for the selected user. Frecuencia de memoriaAJUSTE DEL RELOJ DE ALARMA1. Cercirese de que el aparato est apagado, luego mantenga pulsado el botn SET (Fijar) durante 5 segundos hasta que los dgitos en la pantalla comienzan a destellar.2. Pulse el botn SET (Fijar) para avanzar la pantalla desde la funcin de fecha, hora y conversacin.3. La pantalla tendr una pequea campana ubicada en la esquina superior izquierda.4. Pulse el botn MEM (Memoria) para cambiar el reloj de alarma de apagado a encendido.5. Una vez encendido, pulse el botn SET (Fijar) para pasar a la hora situada arriba del botn ON (Encendido) en la pantalla LCD.6. Pulse el botn MEM (Memoria) para cambiar el dgito de la hora.7. Una vez que haya fijado la hora, pulse el botn SET (Fijar) para pasar a los dgitos de los minutos.8. Pulse el botn MEM (Memoria) para cambiar los dgitos.9. Una vez que haya fijado la alarma y est encendida, aparecer un pequeo cono de campana en la esquina superior izquierda de la pantalla cuando la unidad se apague. 29 INDICADORES DE ERROR Indicadores de error Posibles motivos de errores Indicacin: Inflado incompleto Correccin: Compruebe si el manguito est conectado firmemente al dispositivo. Si se muestra el mismo mensaje de error, pngase en contacto con el servicio de asis tcnica. Indicacin: Manguito inflado en exceso y liberado automticamente. Correccin: Descanse durante 5 a 10 minutos. Luego vuelva a ponerse el manguito y mida nuevamente. Indicacin: No se pudo obtener la frecuencia de pulso. Correccin: Espere de 5 a 10 minutos. Luego vuelva a ponerse el manguito y mida nuevamente. Indicacin: Interferencia electromagntica intensa (teléfono celular o computadora). Correccin: Reljese y descanse durante 5 a 10 minutos. Luego mida nuevamente. Indicacin: Frecuencia de pulso o presin arterial irregulares. Correccin: Relax and take a break for 5-10 minutes. Then measure again.30 SOLUCIN DE PROBLEMASProblema Mtodo recomendadoSin visualizacin Asegrese de que las pilas estn instaladas en la direccin correcta. (La polaridad coincide con la indicacin en el compartimento de las pilas).No se produce la Compruebe que el manguito est colocado correctamente, a continuacin,medicin repita el procedimiento de medicin.Las lecturas de la Su presin arterial puede fluctuar considerablemente a lo largo del da:presin arterial todos los siguientes factores pueden influir en la presin arterial: estadososn variables emociona, actividades/ejercicio diarios, tabaquismo, consumo de bebidas alcohlicas, alimentacin, ingesta de determinados medicamentos. 31 MODO DE CALIBRACIN DEL SENSOR No intente calibrar el dispositivo de presin arterial. La unidad ha sido previamente calibrada por el proveedor. En caso de que surjan problemas con el dispositivo, pngase en contacto con el servicio de asistencia tcnica. Instruccin de transferencia de mmHg y kPa Si desea cambiar las unidades de medicin, apague el dispositivo y luego pulse el botn Start/Stop durante 10 segundos. A continuacin, pulse el botn Memory y seleccione mmHg o Kpa. CUIDADO Y MANTENIMIENTO - Mantenga el dispositivo alejado de temperaturas elevadas, humedad alta y luz solar directa. - Mantenga los objetos afilados lejos del manguito y del tubo. - No presione el botn Start/Stop si no tiene el manguito puesto alrededor del brazo para evitar el exceso de acumulacin de presin que pueda daar el manguito. - Utilice el dispositivo a una distancia suficiente de los dispositivos con campos elctricos fuertes, como el televisor, los hornos de microondas, los equipos de rayos X, etc. - No exponga el dispositivo a un impacto fuerte ni lo deje caer al suelo. - No desarme ni modifique el dispositivo ni el manguito. - Retire las pilas cuando el dispositivo se guarde durante periodos de tiempo prolongados. Nota: Al retirar las pilas se borrarán todas las lecturas de la memoria. Utilice solo un pao suave y seco para limpiar la unidad. No utilice solventes ni otros productos de limpieza a base de petrielo.32 ESPECIFICACIONESModelo del fabricante: BA-813Nmeros de artculos de Medline: MDS5001Mtodo de medicin: OscilomtricoFuncin de memoria: Almacena y recupera 90 mediciones por usuario (hasta 2 usuarios)Pantalla: Pantalla LCD con luz de fondoRango de medicin: Presin: 0-280 mmHg Pulso: 40-199/minutoExactitud del sensor: Presin: 3 mmHg Pulso: 5 %Sistema de inflado: Bomba electro neumticaRangos de tamao del brazo: 22-42 cm (8.6-16.5 pulgadas)Pilas: L.5V alcalina (LR6/AA)X4Apagado automtico: Aprox. 1 minuto despus de la medicinMtodo de referencia para ensayos clnicos: Medicin de auscultacinPeso: Aproximadamente 465g (sin pilas)Condicin operativa: 5 C-40 C (41 F-104 F) 10 %-90 % HRCcondiciones de almacenamiento y transporte: -20 C-65 C (-4 F-149 F) 10 %-95 % HRNorma citada: EN 1060-1 EN 60601-1-2 EN 1060-3 EN 14971 EN 60601-1 33 REGISTRO DE LA PRESIN ARTERIAL Fecha Hora Pulso Estado fsico34 www.medline.com 2021 Medline Industries, LPFabricacin para: Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 EE. UU.Producto de Tawin, Terminado en China 1-800-MEDLINE V4 R21DGA

Is medline blood pressure monitor accurate. Medline blood pressure monitor instructions. Medline blood pressure monitor error codes. How to set medline blood pressure monitor. Medline blood pressure monitor user manual. Medisana bloeddrukmeter pols. Medline blood pressure monitor set time. How to use medline blood pressure monitor.